




ANLEITUNG FÜR DEN LOLLI-SELBSTTEST



Materialien

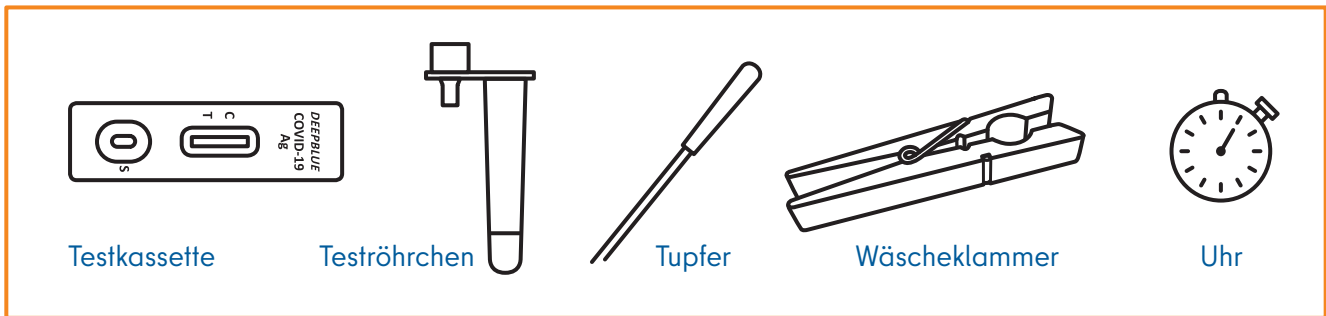


Test vorbereiten

Bereiten Sie den Lolli-Test mit Ihrem Kind vor. Packen Sie die Testkassette aus. Spannen Sie das verschlossene Teströhrchen mit Flüssigkeit in eine Wäscheklammer oder stellen Sie es in ein kleines Glas.

Halten Sie alle Teile des Tests von Kleinkindern fern. Sie könnten verschluckt werden.

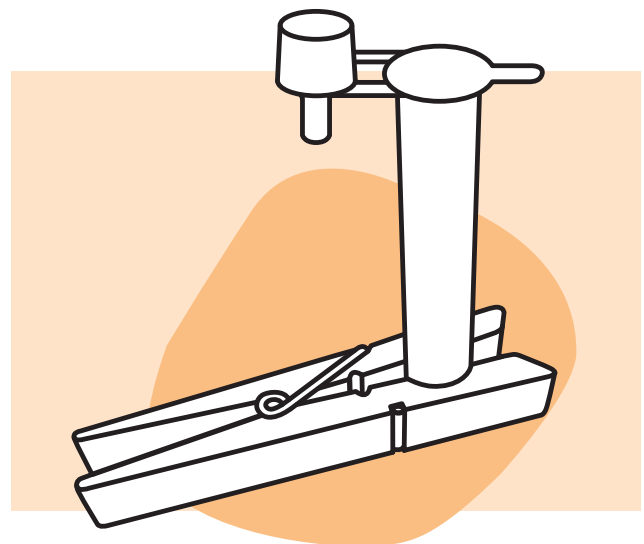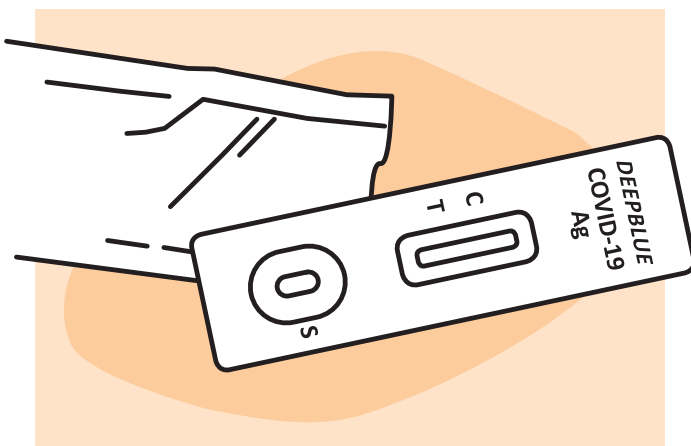



30 Minuten vor dem Test sollte ihr Kind nicht essen oder trinken. Nehmen Sie sich für die Tests mit Ihrem Kind etwas Zeit. Zeigen Sie ihm die Einzelteile. Beschreiben Sie die ersten Schritte, damit Ihr Kind versteht, was passiert. Sagen Sie, dass Sie mit dem Tupfer etwas Spucke aus seinem Mund aufnehmen.

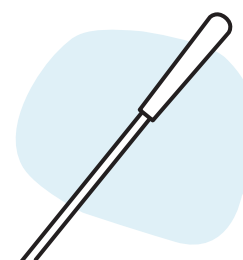

Speichelprobe nehmen

Packen Sie den Tupfer aus. Tupfen Sie mit der weichen Tupferspitze die Zunge und den Mundraum Ihres Kindes ab. Sammeln Sie mit dem Tupfer Speichel aus möglichst vielen Bereichen im Mund. Erklären Sie dabei immer wieder, was Sie machen und warum.

Ihr Kind kann den Tupfer auch wie einen Lolli oder Löffel in den Mund nehmen und damit durch den Mundraum fahren.

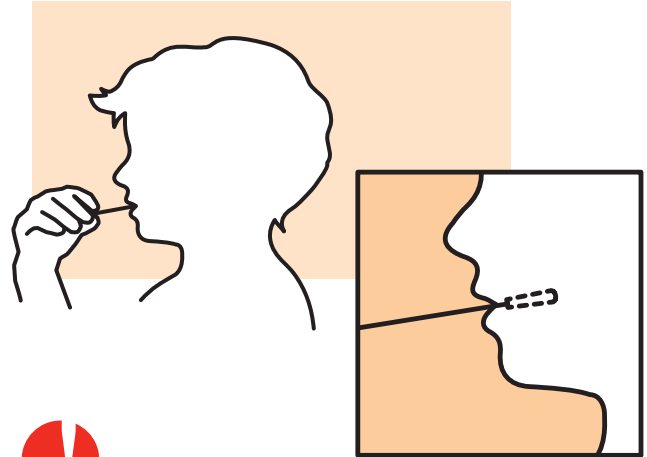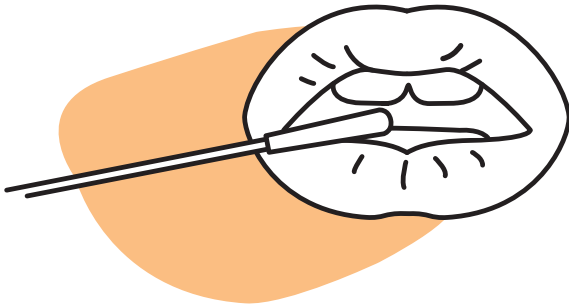



Loben Sie Ihr Kind dafür, wie gut es bei dem Test mitmacht.




Nach einer Minute haben Sie genug Speichel am Tupfer gesammelt. Nehmen Sie das Stäbchen aus dem Mund Ihres Kindes. Es darf nun einige Minuten spielen oder weiter beim Test zusehen.

Speichelprobe verwenden

Öffnen Sie das bereitstehende Teströhrchen. Tauchen Sie dort den Tupfer mit der Speichelprobe Ihres Kindes ein.

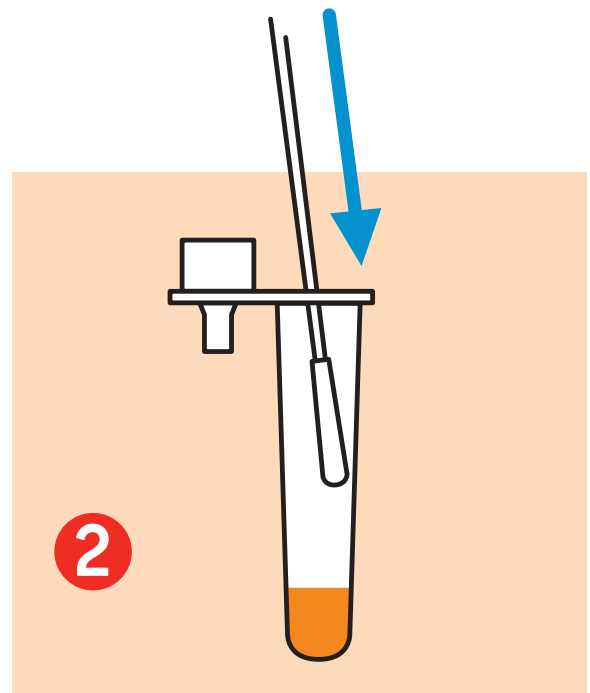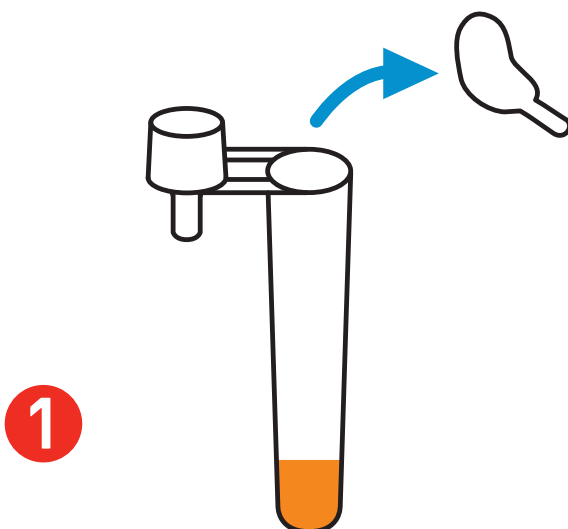


3

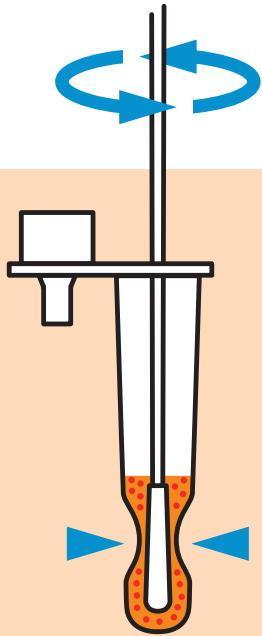

10 Sek

Drehen Sie den Tupfer etwa 10 Sekunden in der Flüssigkeit. Pressen Sie dabei die Tupferspitze dreimal gegen die Röhrenwand, um die Speichelprobe freizusetzen.

4

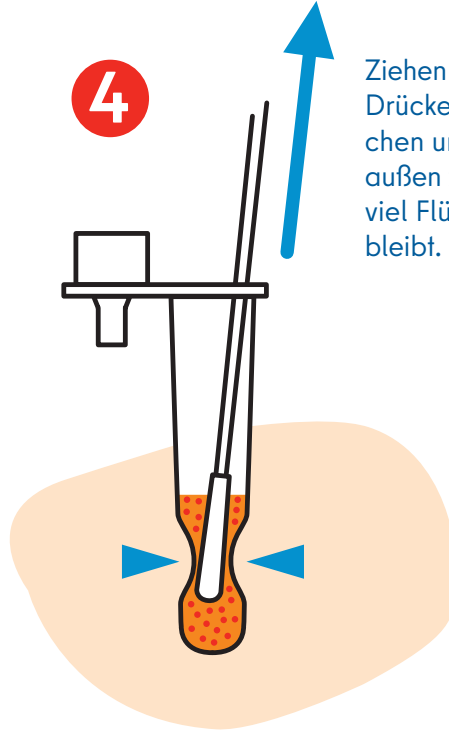

Ziehen Sie den Tupfer heraus. Drücken Sie dabei das Röhren und den Tupfer von außen zusammen, so dass viel Flüssigkeit im Röhren bleibt.

5



Drücken Sie die Tropfkappe fest auf die Öffnung des Teströhrchens.


6

Geben Sie zwei Tropfen aus dem Teströhrchen in die Probenvertiefung (S) auf der Testkassette.




7

Nach 15 Minuten können Sie das Ergebnis ablesen.

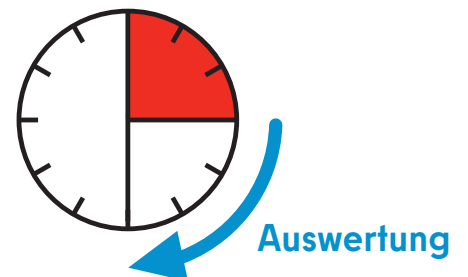


Ergebnis auswerten

C auf der Testkassette steht für Control, T für Test. Erscheint ein Strich bei C, ist das Testergebnis negativ. Erscheint ein Strich bei T, ist das Ergebnis positiv. Auch ein blasser Strich bei T steht für ein positives Ergebnis.



Negativ

Farbige Kontrolllinie (C)



Ungültig /unklar

Keine Kontrolllinie (C)



Positiv

Farbige Kontroll- (C) und Testlinie (T)



Ihr Kind kann die Kita/
Kindertagespflege
besuchen.



Test mit neuem
Material wiederholen.



Melden Sie Ihr Kind in der
Kita/Kindertagespflege ab.

Test entsorgen




Gebrauchte negative Tests
gut verpackt im Hausmüll
entsorgen

Weitere Informationen unter
www.einfach-testen.berlin

Bitte gehen Sie mit
Ihrem Kind zu einem
zentralen Testzentrum
zum PCR-Nachtest.

Nehmen Sie den
positiven Test mit
zum PCR-Nachtest.



Testzentren zur
PCR-Nachtestung